

## Handleiding Medifridge datalogger:

1. Activeer de datalogger door de batterij in werking te stellen;
2. Ga naar [www.elitechus.com](http://www.elitechus.com), klik op DATA LOGGER en kies Elitech Software ;
3. Open 'ElitechLogWin'<sup>1</sup> en sluit de logger aan op uw computer;
4. Stel bij het kopje 'Parameter'<sup>2</sup> tijd, alarmen enz. in;
5. Alarmen stelt u in door 'Multiple Alarms' aan te zetten, H1: hoge temperatuuralarm, L1: lage temperatuuralarm<sup>3</sup>;
6. Heeft u wijzigingen aangebracht? Druk linksonder op 'Save Parameter'<sup>4</sup>;
7. Koppel de datalogger los van uw computer;
8. Druk 8-10 seconden op 'Play'<sup>5</sup> totdat er 'rEC' in het scherm staat, de datalogger gaat nu de temperatuur loggen, leg daarom de datalogger in uw (medische) koelkast;
9. Zodra u de data uit wilt lezen, haalt u de datalogger uit uw (medische) koelkast;
10. Druk 5-6 seconden op 'Pauze'<sup>6</sup> totdat er 'StoP' in het scherm staat, de datalogger is nu gestopt met het loggen van de temperatuur;
11. Sluit de logger aan op uw computer en open het PDF-bestandje wat u ziet, u heeft u een rapport hoe uw (medische) koelkast de afgelopen tijd gedraaid heeft.

